

Sårattrapper

Laerdal

<p>1 Lukket kjevebrudd 2 Kraniebrudd 3 Brukket nese 4 Brystskade 5 Bukskade 6 Utrevet øye 7 Slinger for blod</p>	<p>8 Åpent skinnebensbrudd 9 Åpent underarmsbrudd 10 Dyrebitt 11 Sår, lite fremmedlegeme 12 Sår, stort fremmedlegeme 13 Huggorbitt 14 Stikksår</p>	<p>15 Lukket skinnebensbrudd 16 Lukket håndleddsbrudd 17 Åpent fingerbrudd 18 Avrevet negl 19 Fotskade, tåbrudd 20 Frostskade av tær</p>	<p>21 1., 2., 3. grads forbrenning 22 1., 2. grads forbrenning 23 1. grads forbrenning 24 Strålingskade 25 Sår m. pulsåreblødning 26 Sår m. veneblødning</p>	<p>27 Opprevet sår m. flik 28 Knusningsår 29 Skrubsår 30 Stort snittsår 31 Skuddsår, inn 32 Skuddsår, ut 33 Opprevet sår</p>
--	--	--	--	--

ABspeiderne har 2 stk koffertene med sårattrapper til utlån.

**Det er samme innhold i begge koffertene.
Koffertene er komplette, alle sår er tilstede.**

- 1. Rydd opp etter bruk**
- 2. Legg alle sår tilbake på rett plass**
- 3. Rengjør sår for lim og annet søl STRAKS etter bruk
Bruk grønnnsåpevann eller tilnød rødsprit**
- 4. Ikke søl blod og lim på bruksanvisningen**
- 5. Meld ifra om statusse på utstyret ved tilbakelevering**

I tillegg til sårattrappene anbefales bruk av KUNSTIG BLOD og LATEX LIM for festing av sårene til huden.

Bruksanvisningen beskriver hvordan sårene festes til huden og deretter fjernes igjen.

Bruksanvisningen beskriver også hvor det enkelte sår bør festes på kroppen og markørens opptreden.

Sminke til bruk på pasienten (ansikt og hender) følger IKKE med i koffertene.